

# Vejledning

## Til håndtering af vandprøveresultater fra dentalunits



Analyseresultat	Reaktion	Bemærkninger
Units med kimtal: > 20 og til og med 500 cfu/ml  og/ eller  Legionella pneumophila: < 100 cfu/l (< 10 cfu/100 ml) uanset serogruppe	Klinikken gennemfører vandbehandling af unit som efter en ferie.  Iværksæt overvejelser om: Følges regime for vandbehandling af units? Temperatur på det kolde vand? Fungerer vandbehandlingsanlægget?  Er ovenstående i orden eller bringes i orden, kan unit benyttes.	Vandprøve ved næste planlagte prøvetagning.  Overhold normalt regime for vandbehandling af unit.
Units med kimtal: > 500 cfu/ml	Professionel skylning, samt ovenstående overvejelser.  Unit kan benyttes efter skylningen.	Ny vandprøve efter 2-4 uger.  I perioden gennemfører klinikken vandbehandling af unit som efter weekend.
Units med kimtal: > 1.000 cfu/ml	Professionel skylning.  <b>Unit må ikke anvendes.</b>  Såfremt der er konstateret en oplagt fejl på unit, og denne er rettet, kan unit dog bruges.	Ny vandprøve efter 2-4 uger.  I perioden gennemfører klinikken vandbehandling af unit som efter weekend.
Units med Legionella pneumophila: > 100 til 1000 cfu/liter (> 10 cfu/100 ml til 100 cfu/100 ml) uanset serogruppe.	Professionel skylning.  Unit kan benyttes efter skylningen.  Problematikken udredes.	Ny vandprøve efter 2-4 uger.  I perioden gennemfører klinikken vandbehandling af unit som efter weekend.
Units med Legionella pneumophila: > 1000 cfu/liter (> 100 cfu/100 ml) uanset serogruppe	Problematikken skal udredes af relevante samarbejdspartnere, bl.a. den ejendomsansvarlige, VVS (rørføring) og det firma, der har serviceaftalen på units.  <b>Unit må ikke anvendes.</b>  I udredningsperioden kan man vælge at montere et filter, fx af typen BacTerminator® (Adept), Bin-X eller andet. Vælges dette kan unit bruges umiddelbart efter en tilfredsstillende vandprøve.	Ny vandprøve efter at problematikken er afklaret og udbedret.

2. version 3. April 2017

